



Vor dem Austausch der Referenzflüssigkeit Silikonstopfen reinigen.

Jahr: \_\_\_\_\_

Wie oft?	Wartungsvorgang	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Wöchentlich	O-Ringe des Probennehmers reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Monatlich	Dichtigkeitsprüfung des Probennehmers												
	Reinigung der Luftfilter (x4)												
	Referenzplatten Level Check (bei Stufe 3: Reinigung des Inkubators, Referenzplatte, Glasplatte mit trockenem Tuch/ Tupfer)												
	Reinigung der Probenaufbringungs- und ISE-Einheit												
	Reinigung des Transferriegels												
Jährlich	Austausch der O-Ringe												
Nach Bedarf	Außenfläche reinigen <b>KEIN BLEICHMITTEL VERWENDEN</b>												
	Druckerpapier ersetzen												
	Austausch der Photometerlampe												
	Reinigung des Slide-Barcodelesers												
	Reinigung der IC-Einheit												